



**Volk Optical Inc.**  
7893 Enterprise Drive  
Mentor, OH 44060 USA  
Tlf.: 440-942-6161  
Fax: 440-942-2257  
E-mail: volk@volk.com

**EC REP** EU-repræsentant:  
Rudolf Riester GmbH  
Bruckstraße 31  
72417 Jungingen, Tyskland  
E-Mail: [info@riester.de](mailto:info@riester.de)  
Tel.: +49 74 77 / 92 70-0  
Fax: +49 74 77 / 92 70-70  
**CE** 2797

## Volk®1 kontaktlaser- og diagnostiske linser (direkte kontakt) til engangsbrug

- STERILE STERILISERET MED ETHYLENOXIDGAS.
- KUN TIL ENGANGSBRUG.
- MÅ IKKE ANVENDES HVIS PAKKEN ER ÅBEN ELLER BESKADIGET.
- FØDERAL LOV (USA) FORESKRIVER AT DENNE ENHED KUN MÅ SÆLGES AF ELLER EFTER ORDRE FRA EN LÆGE.

### DANSK: BRUGSANVISNING

#### INDIKATIONER FOR ANVENDELSE

Volk®1 kontaktlaser- og diagnostiske linser (direkte kontakt) engangsbrug er indikeret til anvendelse som diagnostiske linser for undersøgelser af øjefundus samt anvendelse ved behandling af intraokulære anomalier.

#### SPECIFIKATIONER

Produkt	Forstørrelse	Laserpunkt forstørrelsesfaktor	Tilgængelige kontaktdesigns	Antirefleks lasercoating
Volk®1 capsulotomi	1,57	0,63	Standardvæske	BBAR
Volk®1 iridotomi	1,70	0,58	Standardvæske	BBAR



#### ADVARSLER

1. Nedsæk ikke enheden i et dekontaminerende produkt før brugen.
2. Inspicer kontaktoverfladen(erne) for at sikre at den/de er fri for evt. skader (f.eks. skår, ridser, etc.). Hvis enheden er beskadiget, må den ikke anvendes eller repareres.



#### FORHOLDSREGLER

1. For søg ikke at anvende Volk®1 kontaktlaser- og diagnostiske linser (direkte kontakt) til engangsbrug før denne brugsanvisning er læst helt igennem og forstået fuldt ud.
2. Skal anvendes af en autoriseret læge via en metode, som stemmer overens med andre oftalmiske kontaktlaser- og diagnostiske linser med direkte billede.
3. Den sterile emballage samt linsen bør inspiceres før brug.
4. Volk®1 kontaktlaser- og diagnostisk linse (direkte kontakt) til engangsbrug er kun beregnet til anvendelse på en enkelt patient.
5. Må ikke resteriliseres og genbruges.
6. Denne enhed er kun pakket og steriliseret til engangsbrug. Må ikke genbruges, genbehandles eller resteriliseres. Genbrug, genbehandling eller resterilisering kan forårsage en risiko for kontaminering og/eller medføre infektion hos patienten eller krydsinfektion, herunder, men ikke begrænset til, overførsel af infektionssygdom(me) fra en patient til en anden. Kontaminering af enheden kan føre til kvæstelser, sygdom eller død hos patienten.

#### DATO FOR SIDSTE HOLDBARHED

Anvend enheden før datoen for sidste holdbarhed på pakkens mærkat.

#### ANBEFALEDE ANVISNINGER TIL BRUGEN

1. Fjern linsen fra pakken og anbring den på et sterilt arbejdsområde.
2. Kontaktlinser med standardvæske kræver påførsel af methylcelulose eller andre lignende opløsninger til viskøse overflader på den konkave overflade (dvs. mellem cornea og enheden).
3. Volks BBAR antirefleks lasercoating er optimeret til diagnostisk billeddannelse, samt laserprocedurer med synlige og nær-infrarøde bølgelængder (f.eks. argon og diode).
4. Ved beregning af punktstørrelsen på behandlingsstedet skal laserpunktindstillingen multipliceres med den passende laserforstørrelsesfaktor. Se specifikationstabellen for at finde den passende laserforstørrelsesfaktor for den linse, som anvendes.

**STERILE EO**

Steriliseret ved hjælp af ethylenoxid



Må ikke genbruges



Der henvises til brugsanvisningen for vigtige advarselsinformationer



Må ikke anvendes hvis pakken er beskadiget eller åben



Dato for sidste holdbarhed

**LOT**

Partnummer

**REF**

Referencenummer



Producent

**EC REP**

Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union